

AED-2150 音声・イラストガイド（簡略ガイド）

音声		イラスト		備考
成人モード	小児モード	成人モード	小児モード	
成人モードです。	小児モードです。 小学生以上に使用する場合は、 成人にスイッチを切り換えてください。※ 1			※ 1 小児モードで立ち上げた場合、この音声流れます
意識・呼吸を確認してください。				
胸を裸にして、AEDのフタから四角い袋を取り出してください。		 	 	音声が続いている間、1秒ごとにイラストが切り換わります
袋を破いて、パッドを取り出してください。				成人・小児イラスト共通表示
パッドを青いシートからはがして、 図のように右胸と左わき腹に貼ってください。	パッドを青いシートからはがして、 図のように貼ってください。	 	 	パッドが貼られるまで交互にイラストを表示します
体にさわらないでください。 心電図を調べています。体にさわらないでください。				イラストは変わらず音声ガイドメッセージのみ切り換わります
電気ショックが必要です。充電しています。				
充電しています。				
体から離れてください。点滅ボタンをしっかりと押してください。				
電気ショックを行いました。				成人・小児イラスト共通表示
体にさわっても大丈夫です。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。				
胸骨圧迫と人工呼吸を続けてください。				
残り5回です。体から離れてください。				胸骨圧迫残り5回のカウントダウン表示します